

# Guide de consultation rapide SoloSTAR®

## Pour les patients utilisant le Apidra® et/ou le Lantus® SoloSTAR®


Les instructions suivantes ne vous sont offertes qu'à titre de référence. Lisez toujours le mode d'emploi complet avant d'utiliser le stylo injecteur prêt à l'emploi SoloSTAR® pour la première fois. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

### 1 Vérifiez l'insuline

- Assurez-vous d'avoir la bonne insuline.
- Retirez le capuchon du stylo et examinez l'aspect de l'insuline; elle devrait être claire.


### 2 Fixez l'aiguille

- Essayez la rondelle de caoutchouc avec un tampon d'alcool.
- Retirez le film protecteur et posez une nouvelle aiguille.

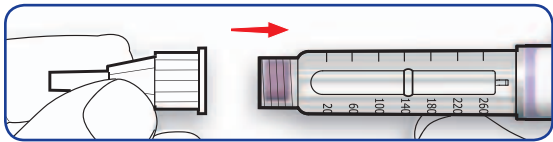


### 3 Faites un test de sécurité

- Sélectionnez une dose de 2 unités.

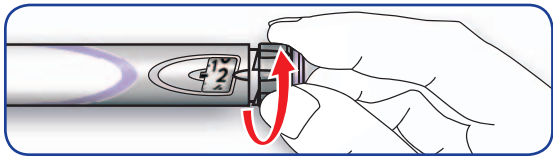


- Retirez les deux capuchons de l'aiguille.
- Tenez le stylo de sorte que l'aiguille pointe vers le haut.
- Tapotez le réservoir d'insuline afin que les bulles d'air se retrouvent près de l'extrémité supérieure.
- Appuyez à fond sur le bouton d'injection et vérifiez si de l'insuline sort de l'aiguille.

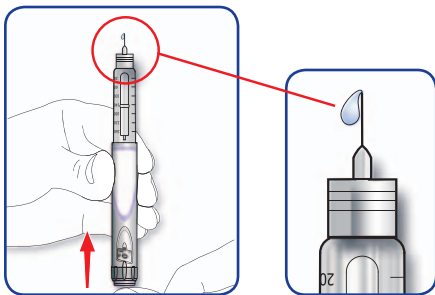

- S'il ne sort pas d'insuline, vous devez recommencer le test.
- Si l'insuline ne sort pas après 3 tentatives, remplacez l'aiguille par une nouvelle et essayez de nouveau.


### 4 Sélectionnez votre dose

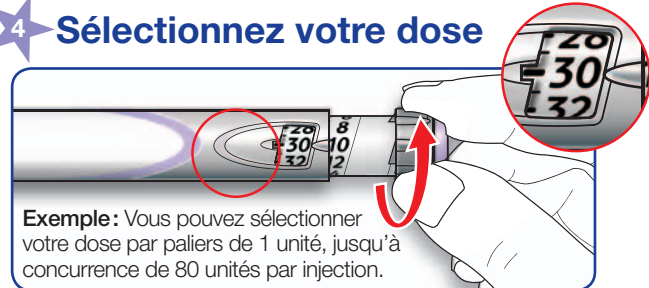

**Exemple:** Vous pouvez sélectionner votre dose par paliers de 1 unité, jusqu'à concurrence de 80 unités par injection.

### 5 Injectez-vous la dose

- En utilisant la méthode d'injection enseignée par votre professionnel de la santé, introduisez-vous l'aiguille dans la peau.
- Appuyez à fond sur le bouton d'injection.
- Gardez le bouton d'injection enfoncé et comptez lentement jusqu'à 10.
- Retirez l'aiguille.

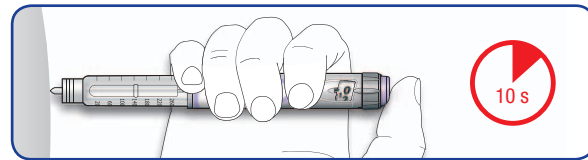

### 6 Dernière étape

- Remettez le capuchon extérieur sur l'aiguille et servez-vous-en pour dévisser l'aiguille du stylo.
- Jetez l'aiguille de façon sécuritaire, p. ex., dans un contenant pour objets pointus et tranchants.
- Remettez le capuchon sur le stylo.



**ASSISTANCE 24 HEURES :  
1.888.852.6887**



**SI VOUS N'ARRIVEZ PAS** à sélectionner la dose voulue, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'insuline dans le réservoir. **SI L'INSULINE NE S'ÉCOULE PAS** après que vous ayez changé l'aiguille, il se peut que votre stylo SoloSTAR® soit endommagé. Ne l'utilisez pas. **CHAQUE STYLO SoloSTAR®** n'est destiné qu'à un seul utilisateur.

Pour plus d'information au sujet de votre médicament ou votre stylo injecteur, visitez notre site web au [www.sanofi.ca](http://www.sanofi.ca).

**SoloSTAR®**