

CARELINK^{MC} COMMENCER À LA MAISON

NOM: SABRINA POIRIER
AVRIL 2020



Avis de non-responsabilité

Ce contenu est offert à titre informatif seulement. Ce contenu ne vise pas à remplacer les conseils, diagnostics et traitements médicaux professionnels. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de tout autre professionnel de la santé qualifié si vous avez des questions concernant votre état de santé.

Medtronic Canada ne vérifie pas et ne contrôle pas le contenu de sites Web externes et n'est pas responsable des activités ou transactions commerciales que vous faites dans ces sites. Votre utilisation d'autres sites est soumise aux conditions d'utilisation et à la déclaration de confidentialité de ces sites. Il se peut que certains des produits figurant dans d'autres sites ne soient pas approuvés pour la vente au Canada.

COMMENT DÉMARRER AVEC CARELINK^{MC} PERSONAL

POUR VOUS AIDER À RESTER CONNECTÉ

- ✓ Où trouvez les ressources pour CareLink^{MC} Personal
- ✓ Comment créer un compte sur CareLink^{MC} Personal
- ✓ Comment accéder à CareLink^{MC} Personal
- ✓ Comment installer le programme de télétransmission de CareLink^{MC}
- ✓ Comment télécharger votre pompe à insuline

COMMENCER AVEC CARELINK^{MC} PERSONAL

The screenshot shows the Medtronic website interface. At the top, the Medtronic logo is on the left, and language options 'Français' and 'Canada - Français' are on the right. Below this is a navigation bar with links: 'Qu'est-ce que le diabète?', 'Produits', 'Soutien', 'Notre communauté', 'À propos de nous', 'eShop', and 'English'. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Rechercher' is also present. A breadcrumb trail reads 'Diabète > Soutien > Assistance au produit > Logiciel CareLink'. The main content area features a dark blue header with the text 'LOGICIEL CARELINK^{MC} PERSONAL' in white and 'ASSISTANCE AU PRODUIT' in yellow. To the right of this header are icons for printing and email. Below the header is a section titled 'RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES' with a list of links: 'Inscription à CareLink Personal', 'Compatibilité du logiciel avec les systèmes informatiques', 'Téléchargement et installation du logiciel de téléversement de CareLink', 'Téléversement de la pompe', and 'Conseils utiles'. To the right of this list is a box titled 'Navigateurs' containing a list of supported browsers: 'Microsoft® Internet Explorer® 10 et 11, 32 bits et 64 bits', 'Apple® Safari® 8, 9 et 10', 'Mozilla® Firefox® 38 à 52 Extended Support Release (ESR)', and 'Google Chrome'. At the bottom of the page, there is a section titled 'INSCRIPTION À CARELINK^{MC} PERSONAL' and a link: 'Le lien vers CareLinkMC Personal est : <https://carelink.minimed.eu>'.

Medtronic

Français ▼ Canada - Français ▼

Qu'est-ce que le diabète? Produits Soutien Notre communauté À propos de nous eShop English

Rechercher

Diabète > Soutien > Assistance au produit > Logiciel CareLink

LOGICIEL CARELINK^{MC} PERSONAL

ASSISTANCE AU PRODUIT

RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES

- [Inscription à CareLink Personal](#)
- [Compatibilité du logiciel avec les systèmes informatiques](#)
- [Téléchargement et installation du logiciel de téléversement de CareLink](#)
- [Téléversement de la pompe](#)
- [Conseils utiles](#)

Navigateurs

- Microsoft® Internet Explorer® 10 et 11, 32 bits et 64 bits
- Apple® Safari® 8, 9 et 10
- Mozilla® Firefox® 38 à 52 Extended Support Release (ESR)
- Google Chrome

INSCRIPTION À CARELINK^{MC} PERSONAL

Le lien vers CareLinkMC Personal est : <https://carelink.minimed.eu>

LE LIEN VERS CARELINK^{MC} PERSONAL EST: HTTPS://CARELINK.MINIMED.EU* ←

Merci de vous être connecté à CareLink. Malheureusement, vos réglages ne correspondent pas aux réglages requis ci-dessous. Veuillez ajuster vos réglages pour une utilisation optimisée.

Vous pouvez toujours utiliser CareLink sans rien changer à vos réglages actuels en appuyant sur le bouton "Continuer" ci-dessous, cependant Medtronic ne saurait garantir son bon fonctionnement.

Vos paramètres		Paramètres requis
Plate-forme :	Windows 10	Windows 7, Windows 8/8.1 Desktop, Windows 10, Mac OS X 10.12/10.13 Utilisateurs de Windows 8/8.1 : fermez tous les navigateurs lancés à partir de l'écran d'accueil et ouvrez votre navigateur à partir du bureau.
Navigateur :	Chrome 80.0.3987.163	IE 10/11 Desktop (Windows), Safari 10/11 (Mac OS X), Firefox 30 Remarque : Les navigateurs tels que Edge, Chrome et la version 52 standard de Firefox (sans prise en charge étendue) présentent des restrictions pour les plug-ins Java qui empêchent les transmissions de vos dispositifs.
Applets :	pris en charge	Pris en charge
JavaScript :	activé	Activé
SSL :	128-bits (clé)	Clé de 128 bits minimum
Résolution :	1280x720	800 x 600 minimum
PaLETTE de couleurs :	24 bits (couleur)	Couleurs de 8 bits minimum

Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre service clientèle au 0800 085 167.

Merci.

Continuer

Bienvenue dans le logiciel de prise en charge du diabète CareLinkTM Personal. Ce logiciel Web vous aide à collecter les informations de tous vos appareils de prise en charge du diabète (pompe à insuline, système de mesure du glucose en continu, lecteur(s) de glycémie et carnet) et à les organiser en graphiques, courbes et tableaux très faciles à interpréter. Ces rapports vous aideront, vous et votre médecin, à découvrir des tendances et d'autres informations pouvant permettre d'améliorer la gestion de votre traitement et de mieux contrôler votre diabète.

Fonctions du logiciel CareLink Personal :

- Des rapports de prise en charge personnelle avec toutes les informations requises

Cher utilisateur CareLinkTM, Medtronic s'engage à traiter vos données médicales personnelles et à les conserver en toute sécurité dans le respect de la loi.

Pour se conformer à la mise à jour du Règlement Général sur la Protection des Données, Medtronic requiert à nouveau que vous consentiez au traitement de vos données médicales personnelles sur CareLinkTM Personal.

À votre prochaine connexion à CareLinkTM Personal, vous serez invité à donner votre consentement.

CareLinkTM Personal

[Modifier le pays/la langue](#)

Désormais tout est à votre portée. Commencez dès aujourd'hui.

[Inscrivez-vous](#)

Déjà membre ?
Enregistrez-vous ici :

Nom d'utilisateur
Mot de passe

[Connexion](#) Mot de passe oublié ?

Autres ressources :

- Minimed.com (en anglais uniquement)
- Online Store (magasin en ligne) Medtronic Diabetes

Veillez sélectionner un pays et une langue

Afrique

- Egypt - English
- South Africa - English

Asie

- Hong Kong - English
- India - English
- Indonesia - English
- Israel - English
- Japan (日本) - 日本語, English
- Kuwait - English
- Lebanon - English
- Malaysia - English
- Philippines - English
- Qatar - English
- Saudi Arabia - English
- Singapore - English
- South Korea - English
- Thailand - English
- Turkey - English
- United Arab Emirates - English
- Vietnam - English

Amérique du Nord

- Canada - English, français

Europe

- Austria (Österreich) - Deutsch, English
- Belgium (Belgie) - Nederlands, français, Deutsch, English
- Bulgaria - English
- Croatia - English
- Czech Republic (Česká republika) - čeština, English
- Denmark - Dansk, English
- Estonia - English
- Finland (Suomi) - suomi, English
- France - français, English
- Germany (Deutschland) - Deutsch, English
- Greece (Ελλάδα) - Ελληνικά, English
- Hungary (Magyarország) - magyar, English
- Iceland - English
- Ireland - English
- Italy (Italia) - italiano, English
- Latvia - English
- Lithuania - English
- Luxembourg - français, Deutsch, English
- Netherlands (Nederland) - Nederlands, English
- Norway (Norge) - norsk, English
- Poland (Polska) - polski, English
- Portugal - English
- Romania - English
- Russia (Россия) - русский, English
- Serbia - English

*Les produits apparaissant sur ce site peuvent ne pas être approuvés au Canada pour la vente.

INSCRIVEZ-VOUS

- EXAMINEZ ,ACCEPTEZ OU REFUSEZ LES CONSENTEMENTS
- FORMULAIRE D'INSCRIPTION COMPLÉTÉ. APPUYEZ SUR ENVOYER

Medtronic CareLink™ Personal

Formulaire d'inscription *-obligatoire

Pour vous inscrire dans le logiciel CareLink Personal, saisissez les informations requises dans le formulaire d'inscription ci-dessous. Les informations requises sont signalées par un astérisque. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton *Envoyer*.

Informations de connexion

*Nom d'utilisateur : ?
Un mot de passe très fiable doit comporter au moins une lettre en majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

*Mot de passe : ?

*Confirmer le mot de passe :

*Question de sécurité : --Sélectionner-- ?

*Réponse de sécurité : ?

Informations patient

*Prénom :

Deuxième prénom ou initiale :

*Nom :

*Adresse 1 :

Adresse 2 :

*Ville :

* État/Province :

Inscrivez-vous

* Code postal :

Pays : Canada

Sexe : --Sélectionner-- ▼

Tranche d'âge : --Sélectionner-- ▼

Type de diabète : --Sélectionner-- ▼


*Téléphone :
+1 xxx-xxx-xxxx

*E-mail :
utilisateur@domaine.fr

*
 Je ne suis pas un robot 
reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

1 PRÉPARATION ET RÉGLAGES PERSONNELS

Pour obtenir des évaluations pertinentes, il est important de vérifier les réglages par défaut du logiciel CareLink^{MC} Personal et de les adapter à votre propre situation et à vos objectifs personnels.

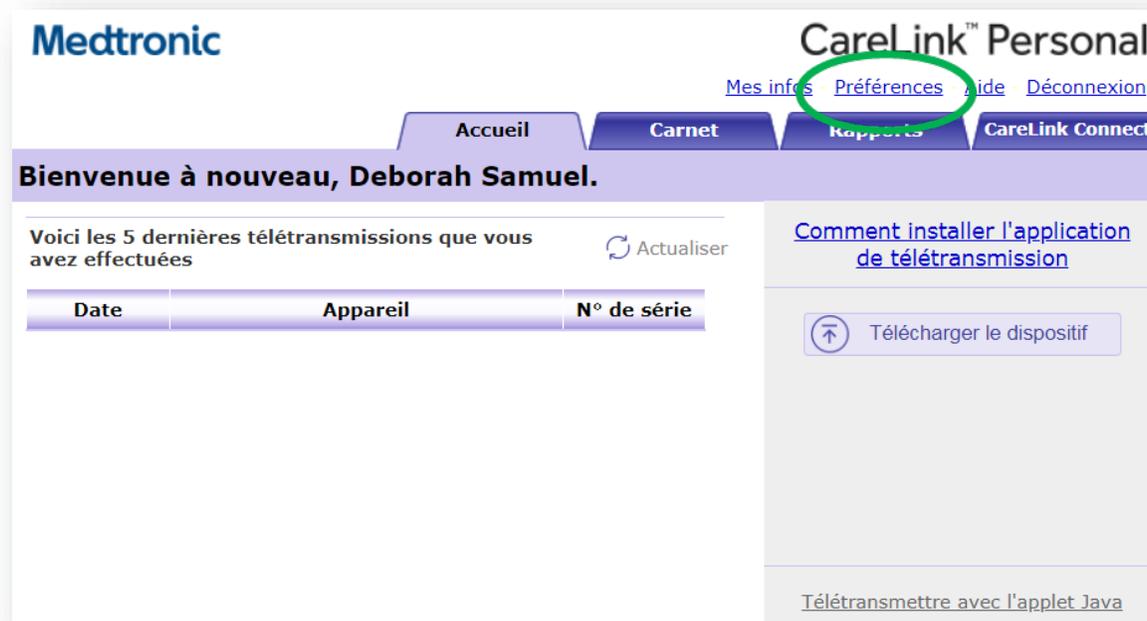

Cliquez sur préférences

1 PRÉPARATION ET RÉGLAGES PERSONNELS

Pour obtenir des évaluations pertinentes, il est important de vérifier les réglages par défaut du logiciel CareLink^{MC} Personal et de les adapter à votre propre situation et à vos objectifs personnels.

Medtronic CareLink™ Personal

Mes infos Préférences Aide Déconnexion

Accueil Carnet Rapports CareLink Connect

Préférences [Mettre à jour](#)

Préférences standard

Unités de glycémie : ?

Limite supérieure : ?

Objectif haut : ?

Objectif bas : ?

Limite inférieure : ?

Seuil d'hypoglycémie : ?

Unités de glucides : ?

Facteur de conversion des glucides : ?

Préférences d'affichage

Langue : ▼

Format horaire : ▼

Important! Assurez-vous d'avoir une plage de glycémies entre 3.9 – 10.0 mmol/L afin de générer un temps dans la plage adéquat.

1 PRÉPARATION ET RÉGLAGES PERSONNELS

Pour obtenir des évaluations pertinentes, il est important de vérifier les réglages par défaut du logiciel CareLink^{MC} Personal et de les adapter à votre propre situation et à vos objectifs personnels.

Medtronic CareLink™ Personal

[Mes infos](#) [Préférences](#) [Aide](#) [Déconnexion](#)

[Accueil](#) [Carnet](#) [Rapports](#) [CareLink Connect](#)

Préférences

Mettre à jour

Préférences standard

Unités de glycémie : ?

Limite supérieure : ?

Objectif haut : ?

Objectif bas : ?

Limite inférieure : ?

Seuil d'hypoglycémie : ?

Unités de glucides : ?

Facteur de conversion des glucides : ?

Préférences d'affichage

Langue : ▼

Format horaire : ▼

1 PRÉPARATION ET RÉGLAGES PERSONNELS

Pour obtenir des évaluations pertinentes, il est important de vérifier les réglages par défaut du logiciel CareLink^{MC} Personal et de les adapter à votre propre situation et à vos objectifs personnels.

Medtronic CareLinkTM Personal

[Mes infos](#) [Préférences](#) [Aide](#) [Déconnexion](#)

Accueil **Carnet** Rapports CareLink Connect

Bienvenue à nouveau, Deborah Samuel.

Voici les 5 dernières télétransmissions que vous avez effectuées [Actualiser](#)

Date	Appareil	N° de série
------	----------	-------------

[Comment installer l'application de télétransmission](#)

[Télécharger le dispositif](#)

Télétransmettre avec l'applet Java

2 TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DE VOS APPAREILS

NOUVEAU
Téléverseur CareLink™ Personal 10.0
 Connectivité fiable pour faciliter le téléversement de données
<https://carelink.minimed.eu>

GUIDE D'INSTALLATION
 Collaboration plus facile avec votre professionnel de la santé

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE :
 Veuillez appeler la ligne d'assistance au 1 800 284-4416

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE VOS RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ EN TÉLÉVERSANT VOS DONNÉES DANS CARELINK™

- Compartez vos tendances glycémiques
- Traitez vos données plus rapidement
- Collaborez plus facilement avec votre professionnel de la santé

COMMENCEZ EN TÉLÉCHARGEANT LE FICHIER D'INSTALLATION DU NOUVEAU TÉLÉVERSEUR

- Connectez-vous à CareLink™ Personal
- Cliquez sur « Commencer » et suivez les étapes qui vous indiquent où télécharger le fichier d'installation »
- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »
- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »

INSTALLEZ LE TÉLÉVERSEUR

- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »
- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »
- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »
- Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez le fichier d'installation »

GUIDE DE TÉLÉVERSEMENT
 Votre première étape vers une meilleure compréhension de votre diabète

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE :
 Veuillez appeler la ligne d'assistance au 1 800 284-4416 ou écrire à dsupport@carelink.medtronic.com

QUATRE ÉTAPES FACILES POUR AJOUTER UNE NOUVELLE POMPE

- Sélectionnez votre pompe
- Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez votre pompe »
- Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez votre pompe »
- Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez votre pompe »

LA PRÉPARATION EST LA CLÉ DU SUCCÈS
 Branchez votre lecteur USB au votre lecteur à votre ordinateur ou à votre lecteur de données avec le CareLink Personal Link

- Branchez votre lecteur de données portable de votre ordinateur »
- Branchez votre lecteur de données portable de votre ordinateur »

Assurez-vous que votre pompe est prête pour le téléversement
 Vérifiez que la pompe n'est pas en mode de veille

- Assurez-vous que la pompe est prête »

TROIS ÉTAPES FACILES POUR TÉLÉVERSER LES DONNÉES D'UNE POMPE OU D'UN LECTEUR

ÉTAPE 1
 Sélectionnez l'appareil

ÉTAPE 2
 Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez les données »

ÉTAPE 3
 Cliquez sur « Télécharger » et téléchargez les données »

Informations sur la sécurité :
 CareLink™ Personal 10.0 est un logiciel de télémédecine. Il ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer, traiter ou surveiller une condition médicale sans la supervision d'un professionnel de la santé. CareLink™ Personal 10.0 est un logiciel de télémédecine. Il ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer, traiter ou surveiller une condition médicale sans la supervision d'un professionnel de la santé.

Medtronic
 Personal CareLink™
 10.0 est un logiciel de télémédecine. Il ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer, traiter ou surveiller une condition médicale sans la supervision d'un professionnel de la santé.

PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Parlez à votre professionnel de la santé à propos de CareLink™ pour un partage de données plus efficace

INSTALLATION DU PROGRAMME DE TÉLÉTRANSMISSION DE CARELINK^{MC}


CareLink[®]

L'application de télétransmission CareLink doit être installée une fois sur chaque ordinateur.

L'application de télétransmission vous permettra de télécharger les données de votre dispositif de prise en charge du diabète (par ex. pompe, lecteur, ou moniteur Guardian).

Comment installer l'application de télétransmission CareLink

- 1 Vérifiez que vous disposez de droits d'administrateur sur l'ordinateur pour installer l'application.
- 2 Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger l'application de télétransmission CareLink.
[Télécharger le programme d'installation de l'application de télétransmission CareLink](#)
- 3 Exécutez le programme téléchargé pour installer l'application de télétransmission CareLink.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

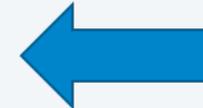


Si vous avez besoin d'aide, contactez le service d'assistance en ligne de Medtronic ou votre représentant local.

Support technique informatique: 1-800-284-4416 – support anglais et français.

TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE POMPE À INSULINE

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE GLUCOMÈTRE SOIT LIÉ À VOTRE POMPE À INSULINE.

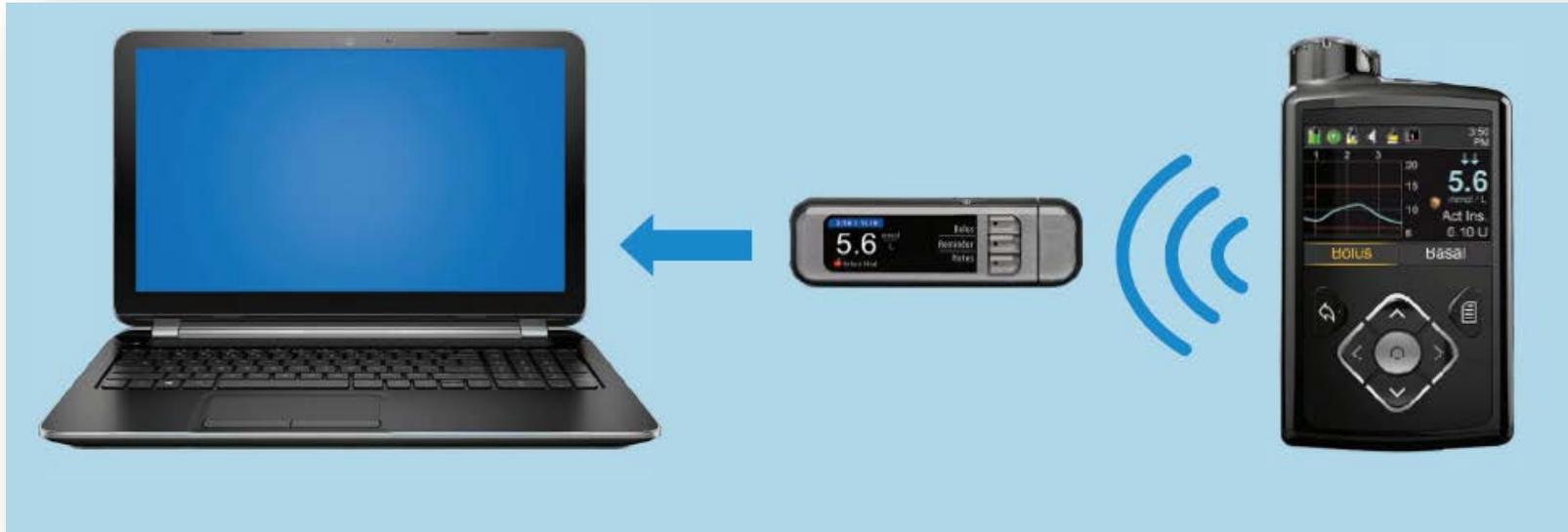

**Si votre glucomètre Contour Next Link n'est pas connecté à votre pompe à insuline, vous référer à votre manuel d'utilisateur pour les connecter l'un à l'autre.

ÉTAPES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE POMPE OU GLUCOMÈTRE

GUIDE DE TÉLÉVERSEMENT

Votre première étape vers une meilleure compréhension de votre diabète

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE :
Veuillez appeler la ligne d'assistance au 1 800 284-4415 ou écrire à diabete@ca.medtronic.com

QUATRE ÉTAPES FACILES POUR AJOUTER UNE NOUVELLE POMPE



Dans Internet Explorer, Chrome ou Firefox, rendez-vous au <http://www.diabete.medtronic.ca>

1 Sélectionner votre pompe



2 Vous pouvez télécharger les données d'une pompe 6000, Facalign et de tout autre modèle



3 Entrez le numéro de série de la pompe

- Entrez tous les chiffres et toutes les lettres pour le 6000 et jetez les chiffres pour le Facalign



4 Assurez-vous que la pompe est prête

- Cliquez sur «Ajouter la pompe»



LA PRÉPARATION EST LA CLÉ DU SUCCÈS

Il vous faut un lecteur USB ou votre lecteur à votre ordinateur ou à votre lecteur de glycémie avec @Connector Next Link

- Placez votre pompe le plus près possible de votre ordinateur
- Cliquez le bouton connecté à la pompe



Assurez-vous que votre pompe est prête pour le téléversement
Vérifiez que la pompe n'affiche pas un de ces écrans :





- Aucun message reçu temporairement
- Aucune donnée
- Aucune donnée à 57
- Aucune donnée valide

Vérifiez que la date et l'heure correspondent à celles que votre ordinateur affiche

TROIS ÉTAPES FACILES POUR TÉLÉVERSER LES DONNÉES D'UNE POMPE OU D'UN LECTEUR

ÉTAPE 1



1 Sélectionner l'appareil

ÉTAPE 2



2 Assurez-vous que l'appareil est prêt pour le téléversement

- Cliquez sur «Téléverser maintenant»

ÉTAPE 3 PRÉPAREZ LE TOUT

Branchez votre dispositif USB ou votre lecteur sur votre ordinateur

- Placez votre pompe le plus près possible de votre ordinateur
- Cliquez le lecteur connecté à la pompe

Informations sur le logiciel :
logiciel CareLink™

Le logiciel CareLink est destiné à être utilisé comme outil complémentaire et ne remplace pas le traitement du diabète et les conseils médicaux reçus de votre médecin.

*Le logiciel s'agit d'un produit Medtronic et ne doit pas être utilisé sans la supervision appropriée de votre professionnel de santé. Les données de votre lecteur de glycémie ou de votre pompe à insuline ne sont pas garanties.

© Medtronic 2014. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et le logo CareLink, ainsi que le logo de Medtronic et le logo de Medtronic, sont des marques de Medtronic. Les marques de Medtronic sont des marques de Medtronic de Medtronic.

Medtronic
Medtronic Canada
10, rue Havelock
Boulevard (Ottawa)
L4T 1G8
Tél. 1 800 284-4415
diabete@ca.medtronic.com
UC20130311FC

PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ



Parlez à votre professionnel de la santé à propos de CareLink™ pour un partage de données plus efficace

3 SÉLECTION DES RAPPORTS AUX FINS D'EXAMEN

Des groupes de rapports sont maintenant offerts afin de vous aider à choisir les rapports les plus utiles en fonction de vos besoins particuliers. Un aperçu du tableau de bord des rapports est présenté ci-dessous.

1. Sélectionnez une période : 2 semaines 1 mois 3 mois Person.

2020-03-26 - 2020-04-08

2. Sélectionnez des rapports : Total = 0 rapport(s) Générer les rapports

Groupes de rapports

-  **Groupes de rapports pour mes progrès et mes tendances** (plus de détails...) Ajouter à la liste
J'aimerais voir les tracés de ma mesure de glucose. J'aimerais connaître la moyenne de mon taux de glucose et la dose totale d'insuline quotidienne.
-  **Groupes de rapports pour les taux de glucose au repas** (plus de détails...) Ajouter à la liste
J'aimerais suivre mes bolus repas, mon taux de glucose après avoir mangé et la quantité de nourriture que je mange.
-  **Groupes de rapports pour les valeurs élevées et les valeurs basses** (plus de détails...) Ajouter à la liste
J'aimerais connaître le lien entre mes activités et mon taux de glucose jour après jour.
-  **Groupes de rapports pour la pompe mais pas le capteur** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Je dispose d'une pompe sans mesure du glucose en continu mais je souhaite tout de même suivre l'évolution de ma glycémie et mon utilisation de l'insuline.
-  **Rapport pour les réglages de ma pompe** (plus de détails...) Ajouter à la liste
J'aimerais enregistrer mes réglages avant de les modifier. J'aimerais garder une trace de mes réglages actuels.
-  **Bundled reports for MM670G system** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Je souhaite vérifier si mon contrôle glycémique s'améliore et savoir ce que je peux faire pour continuer à rester en mode auto.



-  **Revue hebdomadaire** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Vérifiez le glucose, l'insuline, la nourriture et les événements jour après jour, pendant une semaine.
Actuellement pour le système MM670G uniquement.
-  **Assistant bolus de repas** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Comparez les différences entre la glycémie et la glycémie du capteur avant et après l'administration d'un bolus pour chaque repas.
Actuellement pour le système MM670G uniquement.
-  **Tableau de gestion du traitement et résumé des excursions** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Identifiez visuellement les tendances et les excursions glycémiques, et consultez rapidement le rapport de la pompe et du CGM.
Non disponible pour le système MM670G.
-  **Utilisation de l'appareil** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Identifiez les bonnes pratiques en suivant la manière dont vous utilisez votre pompe.
-  **Rapport capteur et lecteur** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Identifiez visuellement les tendances du capteur et de la glycémie pour chaque heure ou repas de la journée. Identifiez le lien entre le glucose, l'insuline, la nourriture et les événements jour après jour.
Non disponible pour le système MM670G.
-  **Carnet** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Comparez les enregistrements de glycémie et de la pompe au fil des jours et heure par heure au format carnet.
-  **Instantané des réglages** (plus de détails...) Ajouter à la liste
Enregistrez tous les derniers réglages de votre pompe pour les conserver.



RAPPORTS QUOTIDIENS

1. Sélectionnez une période : 2 semaines 1 mois 3 mois Person.

2020-03-26 - 2020-04-08

2. Sélectionnez des rapports : Total = 0 rapport(s) Générer les rapports

Groupes de rapports

- Groupes de rapports pour mes progrès et mes tendances**
(plus de détails...)
J'aimerais voir les tracés de ma mesure de glucose. J'aimerais connaître la moyenne de mon taux de glucose et la dose totale d'insuline quotidienne. [Ajouter à la liste](#)
- Groupes de rapports pour les taux de glucose au repas**
(plus de détails...)
J'aimerais suivre mes bolus repas, mon taux de glucose après avoir mangé et la quantité de nourriture que je mange. [Ajouter à la liste](#)
- Groupes de rapports pour les valeurs élevées et les valeurs basses**
(plus de détails...)
J'aimerais connaître le lien entre mes activités et mon taux de glucose jour après jour. [Ajouter à la liste](#)
- Groupes de rapports pour la pompe mais pas le capteur**
(plus de détails...)
Je dispose d'une pompe sans mesure du glucose en continu mais je souhaite tout de même suivre l'évolution de ma glycémie et mon utilisation de l'insuline. [Ajouter à la liste](#)
- Rapport pour les réglages de ma pompe**
(plus de détails...)
J'aimerais enregistrer mes réglages avant de les modifier. J'aimerais garder une trace de mes réglages actuels. [Ajouter à la liste](#)
- Bundled reports for MM670G system**
(plus de détails...)
Je souhaite vérifier si mon contrôle glycémique s'améliore et savoir ce que je peux faire pour continuer à rester en mode auto. [Ajouter à la liste](#)

- Revue hebdomadaire**
(plus de détails...)
Vérifiez le glucose, l'insuline, la nourriture et les événements jour après jour, pendant une semaine.
Actuellement pour le système MM670G uniquement. [Ajouter à la liste](#)
- Assistant bolus de repas**
(plus de détails...)
Comparez les différences entre la glycémie et la glycémie du capteur avant et après l'administration d'un bolus pour chaque repas.
Actuellement pour le système MM670G uniquement. [Ajouter à la liste](#)
- Tableau de gestion du traitement et résumé des excursions**
(plus de détails...)
Identifiez visuellement les tendances et les excursions glycémiques, et consultez rapidement le rapport de la pompe et du CGM.
Non disponible pour le système MM670G. [Ajouter à la liste](#)
- Utilisation de l'appareil**
(plus de détails...)
Identifiez les bonnes pratiques en suivant la manière dont vous utilisez votre pompe. [Ajouter à la liste](#)
- Rapport capteur et lecteur**
(plus de détails...)
Identifiez visuellement les tendances du capteur et de la glycémie pour chaque heure ou repas de la journée. Identifiez le lien entre le glucose, l'insuline, la nourriture et les événements jour après jour.
Non disponible pour le système MM670G. [Ajouter à la liste](#)
- Carnet**
(plus de détails...)
Comparez les enregistrements de glycémie et de la pompe au fil des jours et heure par heure au format carnet. [Ajouter à la liste](#)
- Instantané des réglages**
(plus de détails...)
Enregistrez tous les derniers réglages de votre pompe pour les conserver. [Ajouter à la liste](#)



Rapports quotidiens

(plus de détails...)

Analysez les rapports quotidiens pour identifier et résoudre les éventuels problèmes et mettre en lumière les bons résultats.

[+](#)
Ajouter à la liste

14 derniers jours de votre sélection de dates (2020-03-26 - 2020-04-08)

Sélectionner la ou les date(s)

26 je 27 ve 28 sa 29 di 30 lu 31 ma 1 me 2 je 3 ve 4 sa 5 di 6 lu 7 ma 8 me

Exportation de données (CSV)

MÉTHODOLOGIE D'INTERPRÉTATION

YES! iCAN

Interprétation des rapports Carelink Pro



1

Positif

Changements de cathéter

Port du capteur

Prises de glycémies régulières

Utilisation assistant bolus

Réduction bolus manuels

↓ suggestions non suivies

Meilleur contrôle post repas

Changement comportemental

Amélioration contrôle général

2

Problème (Issue)

Comportement

Hypoglycémie

Hyperglycémie

MERCI!

